

NitWits®

KOPFLÄUSEKAMM

WICHTIG VERWENDUNGSZWECK: NitWits Kopfläusekamm ist ein Medizinprodukt, das zum Finden und Entfernen von Kopfläusen und Nissen vom Haarschaft dient

ANWENDUNG:

NASS ODER TROCKEN KÄMMEN

1. Wählen Sie je nach Haartyp den Kamm mit den langen oder kurzen Zähnen aus.
2. Verwenden Sie zuerst die Entwirrseite des Läusekamms, um Knoten und Verfilzungen aus dem Haar zu lösen.
3. Unterteilen Sie das Haar in 4 cm breite Abschnitte und kämmen Sie diese mit dem Metallkamm von der Wurzel bis zur Spitze durch. Wischen Sie Läuse oder Nissen mit einem Papiertuch vom Kamm ab. *Tipp: Der Kamm mit den kurzen Zähnen eignet sich am besten zum Entfernen von Nissen.*
4. Kämmen Sie so lange, bis die Haare offensichtlich frei von Läusen und Nissen sind. *Tipp: Verwenden Sie die Lupe, um die Haare noch genauer zu prüfen.*
5. Schritte 2 und 4 sollten zwei Wochen lang alle 3 bis 4 Tage wiederholt werden, um sicherzugehen, dass der Lebenszyklus der Kopfläuse beendet wurde.
6. Danach Haar gründlich mit warmem Wasser ausspülen und wie gewohnt mit Shampoo waschen. NitWits Kopfläusekamm in warmem Wasser mit Seife auswaschen und dann trocknen.

VERWENDUNG DES BEHANDLUNGSMITTELS

1. Wir empfehlen das NitWits All-In-One Kopfläusemittel zu verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen um Kopfläuse und Nissen zu töten.
2. Verwenden Sie den NitWits Kopfläusekamm, um Nissen vom Haarschaft zu entfernen.

ACHTUNG

Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung. Falls Symptome fortbestehen, bitten Sie einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal um Rat. Kamm nicht abkochen. Nicht verwenden, wenn der Kamm beschädigt ist. TROCKEN LAGERN. Nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit NitWits All-in-One auftritt, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet, gemeldet werden.

Verpackung mit Bedacht entsorgen und wenn möglich recyceln. Karton und Gebrauchsanweisung sind 100% recycelbar. Die Plastikverpackung kann in Systemen, die PE akzeptieren, recycelt werden.



Weitere Informationen zu Kopfläusen, Tipps und Behandlungsmöglichkeiten sind unter nitwitsforkids.com zu finden.

Kontaktinformationen

SI&D (Aust) Pty Ltd 29-31 Solent Circuit, Norwest, NSW, 2153 Australien, 1800 888 815

AU: Sponsor: N-Hance Pty Ltd, 29-31 Solent Circuit, Norwest, NSW, 2153

NZ: Vertrieben von: SI&D (NZ) Ltd, 24B Moorefield Rd, Johnsonville, Wellington, 6037, 0800110257

EC REP: Obelis s.a Bd General Wahiis 53 1030 Brussels Belgien. Tel.+(32) 2 732-59-54 Fax:+(32)2 732-60-03 mail@obelis.net

Stand der Gebrauchsanweisung: 4. Oktober 2022.



HLCVP_000_6563GE-LS1-01