

68
5

# NitWits®

**KNOTEN UND VERFÜLLUNGEN MIT ENTWIRRKAMM GLÄTTEN**

**LEICHTES AUFFINDEN VON LÄUSEN UND NISSEN MIT 5-FACHER LUPE**

**KOMFORTABLES KÄMMEN MIT ERGONOMISCHEM GRIFF**

**KURZE ZÄHNE FÜR KURZES HAAR**

**LANGE ZÄHNE FÜR LANGES HAAR**

## Anwendung

**NASS ODER TROCKEN KÄMMEN**

- 1 Wählen Sie je nach Haartyp den Kamm mit den langen oder kurzen Zähnen aus.
- 2 Verwenden Sie zuerst die Entwirrseite des Läusekamms, um Knoten und Verfilzungen aus dem Haar zu lösen.
- 3 Unterteilen Sie das Haar in 4 cm breite Abschnitte und kämmen Sie diese mit dem Metallkamm von der Wurzel bis zur Spitze durch. Wischen Sie Läuse oder Nissen mit einem Papiertuch vom Kamm ab. *Tipp: Der Kamm mit den kurzen Zähnen eignet sich am besten zum Entfernen von Nissen.*
- 4 Kämmen Sie so lange, bis die Haare offensichtlich frei von Läusen und Nissen sind. *Tipp: Verwenden Sie die Lupe, um die Haare noch genauer zu prüfen.*
- 5 Schritte 2 und 4 sollten zwei Wochen lang alle 3 bis 4 Tage wiederholt werden, um sicherzugehen, dass der Lebenszyklus der Kopfläuse beendet wurde.
- 6 Danach Haar gründlich mit warmem Wasser ausspülen und wie gewohnt mit Shampoo waschen. NitWits Kopfläusekamm in warmem Wasser mit Seife auswaschen und dann trocknen.

**VERWENDUNG DES BEHANDLUNGSMITTELS**

- 1 Wir empfehlen das NitWits All-In-One Kopfläusemittel zu verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen um Kopfläuse und Nissen zu töten.
- 2 Verwenden Sie den NitWits Kopfläusekamm, um Nissen vom Haarschaft zu entfernen.

[nitwitsforkids.com](http://nitwitsforkids.com)  
für weitere Informationen zu Kopfläusen, Tipps und Behandlungsmöglichkeiten

**PRINTER TO  
GENERATE BARCODE  
638995006563**

**KAMM NICHT ABKOCHEN. NICHT VERWENDEN, WENN DER KAMM BESCHÄDIGT IST. TROCKEN LAGERN.**

**Kopfläusekamm  
Vorteilspack**

**Auskämmen  
von  
Läusen  
und  
Nissen**

**Läusekämme**

♂ für kurze und lange Haare

Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung. Falls Symptome fortbestehen, bitten Sie einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal um Rat.

CE

3-in-1

Läuse- und Nissenentferner + Entwirrer + 5-fache Lupe

231
5

68
5

Vorteilspack!  
x2 KÄMME

# NitWits®

## Kopfläusekamm Vorteilspack

### Auskämmen von Läusen und Nissen

**Läusekämme**

♂ für kurze und lange Haare

Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung. Falls Symptome fortbestehen, bitten Sie einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal um Rat.

CE

3-in-1

Läuse- und Nissenentferner + Entwirrer + 5-fache Lupe

231
5

Mit Liebe  
hergestellt

Nadine Ismiel-Nash  
MUTTER, WISSENSCHAFTLERIN  
& ERFINDERIN VON NITWITS

SI&D (Austl) Pty Ltd 29-31 Solent Cct, Norwest, NSW 2153 Australia ☎ 1800 888 815.

**MEDIZINPRODUKT** AU: Sponsor: N-Hance Pty Ltd, 29-31 Solent Cct, Norwest, NSW 2153.  
 NZ: Distributed by: SI&D (NZ) Ltd, 248 Moorsfield Rd, Johnsonville, Wellington 6037.  
 NZ ☎ 0800 110 257. Obelis s.a Boulevard Général Watis 53 1030 Brussels, Belgium  
 tel. +(32) 2 732-59-54 Fax: +(32) 2 732-60-03 E-mail: mail@obelis.net

HICVP\_000\_6563GE-PS1-02

Achten Sie bei der Entsorgung der Umverpackung darauf, sie zu recyceln, wann immer es möglich ist.  
 Packungsbeilage aus Papier ist zu 100 % recycelbar. Kunststoffverpackung kann recycelt werden, wenn Systeme für das PE-Recycling in Ihrer Nähe vorhanden sind.